



Produktkatalog

Hernien-Unterwäsche und -Gürtel für Stomatragende

Ein Service von

 publicare

Unser Stoma-Team kennt die Antworten auf Ihre Fragen.



Sie haben die Wahl.

Wir freuen uns, Ihnen unsere Kollektion der Hernien-Unterwäsche und -Gürtel vorzustellen. Diese Produkte werden in der Schweiz exklusiv durch Publicare vertrieben. Sie sind für sie und ihn in verschiedenen Grössen und Ausführungen erhältlich.

Hernien-Unterwäsche und -Gürtel werden häufig als Prophylaxe zur Vorbeugung oder als Unterstützung bei einer bestehenden Hernie (Bruch) empfohlen.

Alle Produkte sind in verschiedenen Grössen erhältlich und werden individuell für Sie angefertigt.

Sie wählen zwischen Gürtel und Unterwäsche und bestimmen den Schnitt, die Form und die Farbe.

Die Produkte tragen Sie, wie empfohlen, über dem Stomabeutel oder Sie lassen eine Öffnung auf Ihr Stoma anpassen. Infos und eine Anleitung finden Sie auf den folgenden Seiten.

Lassen Sie sich bei der Bestellung der Hernien-Unterwäsche oder der -Gürtel von Ihrer Stomatherapeutin oder von unserem Kundendienst beraten. Mit einem Rezept können wir diese Produkte an Ihre Krankenkasse verrechnen im Rahmen der jährlichen Stoma-Limite.

Wir kennen die Antworten auf Ihre Fragen. Rufen Sie uns einfach an: Telefon 056 484 15 00 oder senden Sie eine eMail an info@publicare.ch. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Publicare AG





Hernien-Gürtel für Frauen und Männer.

Starke Gewebestütze.



Easy Peel Belt
Klett-
verschluss

Stoma-Herniengürtel sind aus einem einzigartigen dehnbaren Material hergestellt, welches unterstützend wirkt. Der Druck verteilt sich regelmässig auf den ganzen Gürtel während die Flexibilität eine normale Stomafunktion garantiert.



Tube Belt
Schlupfform

Bei Tests wurde festgestellt, dass der Gürtel sehr angenehm zu tragen ist, da kein Gefühl der Einschränkung entsteht und er eine exzellente Unterstützung aufweist.

Erhältlich ist der Gürtel auch als Schlupfform «Tube Belt» und für Frauen mit Spitzenüberzug.

Breathable Belt für Frauen und Männer.

Starke Gewebestütze.



Glättet
die Form des
Körpers

Der Breathable Tube Belt ist ein atmungsaktiver Gürtel in Schlupfform. Der Breathable Easy Peel Belt ist mit einem Klettverschluss zu verschliessen.

Das leichte Material und die einzigartigen Öffnungen im Stoff sorgen für eine gute Luftzirkulation und lassen Wärme entweichen. Der Gürtel ist



Diskretes
Design für ein
gutes Gefühl.

dadurch ideal für Freizeitaktivitäten ohne die Unterstützung des Unterleibs zu mindern.

Beidseitig selbsthaftende Silikonbänder und ein geformter Rücken halten den Gurt in Position, erhöhen Passform sowie Komfort und verhindern ein Abrollen.



Besonders praktisch: Die Breathable Belts sind reversibel und können rechts oder links getragen werden.



Hernien-Gürtel für Frauen und Männer.

Die Vorzüge auf einen Blick.



Nachträglich
angebrachte
Öffnung



- Unterstützung des Unterleibs während körperlichen Aktivitäten
- Kann über dem Stomabeutel getragen werden
- Der Klettverschluss ermöglicht einfaches Anziehen und zeichnet sich durch volle Anpassung aus
- Erhältlich in 7 Grössen, XS – 3XL oder nach Wunsch
- Erhältlich in 15 cm, 20 cm und 26 cm Breite oder nach Wunsch
- Spezielle Abschlusskante, die das Rutschen und Zusammenrollen des Gürtels verhindert
- Erhältlich in Beige, Schwarz oder Weiss
- Die Gürtel werden gemäss persönlichen Angaben hergestellt

Easy Peel-, Tube- und Shield-Belt

Shield Belt mit Stomaschutz, welcher mit einem Klett auf dem Gürtel befestigt werden kann (links oder rechts).

Grösse	Umfang über Stoma
Small	75 – 90 cm
Medium	90 – 105 cm
Large	105 – 120 cm
X-Large	120 – 135 cm
XX-Large	135 – 148 cm

Den Stoma-Herniengürtel und Shield-Belt gibt es in den Höhen 15, 20 und 26 cm.

Breathable Easy Peel und Tube Belt

Grösse	Umfang über Stoma
X-Small	74 – 82 cm
Small	78 – 90 cm
Medium	86 – 98 cm
Large	94 – 106 cm
X-Large	102 – 116 cm
XX-Large	112 – 130 cm
XXX-Large	126 – 148 cm

Wünschen Sie mehr Unterstützung?

Dann wählen Sie den Breathable Tube Belt eine Grösse kleiner.



Hernien-Unterwäsche für Frauen und Männer.

Die äusserst bequeme Hernien-Unterwäsche hält den ganzen Unterbauch bis hin zum Rippenbogen kompakt zusammen. So erhalten Sie nicht nur eine schöne Silhouette sondern beugen auch der Entstehung von Hernien vor.

Die Wäsche ist mit einer individuellen Stomaöffnung erhältlich. Der Schritt ist mit Klettverschluss, kombiniert mit zusätzlichen Druckknöpfen sowie auch ohne Öffnung erhältlich. Die Unterwäsche ist ausserdem mit Beinen verfügbar.

Alle Artikel sind in Beige, Schwarz und Weiss sowie für Frauen mit Spitzenüberzug verfügbar.

Breathable Briefs und Shorts für Frauen und Männer.

Sanfte Gewebestütze.



Die Breathable Briefs und Shorts sind atmungsaktive Hernien-Unterwäsche mit sanfter Stütze.

Das leichte Material und die einzigartigen Öffnungen im Stoff sorgen für eine gute Luftzirkulation und lassen Wärme entweichen. Dank der integrierten Verstärkung und der hoch geschnittenen Taille stabilisiert sie die Stomaumgebung.




Die Unterwäsche ist als Shorts mit Bein und als Brief ohne Bein in Beige, Schwarz oder Weiss erhältlich.

Grösse	Hüftumfang
S/M	71 – 81 cm
M/L	86 – 97 cm
L/XL	102 – 112 cm
XL/2XL	117 – 127 cm
2XL/3XL	132 – 142 cm




Hernien-Unterwäsche für Frauen.


Starke Gewebestütze.

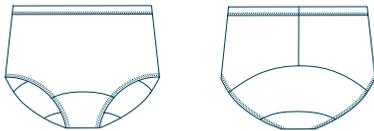

AMI SPX | Tiefe Taille

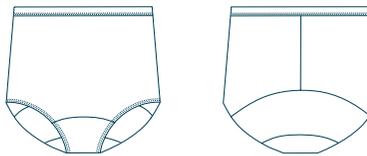


AMI SPX | Hohe Taille

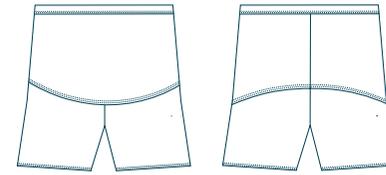

AMI SPX | Mit Bein

Auf Wunsch erhältlich mit
angepasster Stomaöffnung.

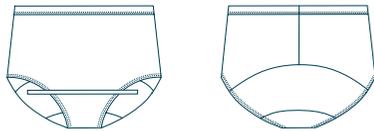

AMI SPX | Verschluss

1. Klettverschluss
2. Klettverschluss mit Druckknöpfen






Alle Modelle AMI SPX sind in Beige, Schwarz oder Weiss verfügbar.

Grösse	Taille Mann	Hüfte Frau
Small	76 - 89 cm	91 - 99 cm
Medium	90 - 103 cm	100 - 108 cm
Large	104 - 117 cm	109 - 117 cm
X-Large	118 - 131 cm	118 - 126 cm
XX-Large	132 - 145 cm	127 - 135 cm


Varianten Frau Mann	Varianten Nur Frau
Tiefe Taille	Klettverschluss
Hohe Taille	Klettverschluss mit Druckknöpfen
Mit Bein	
Ohne Bein	Spitzenüberzug

Hernien-Unterwäsche für Männer.


Starke Gewebestütze.

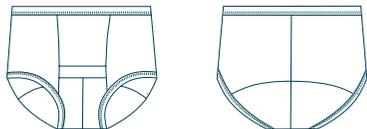

AMI SPX | Tiefe Taille

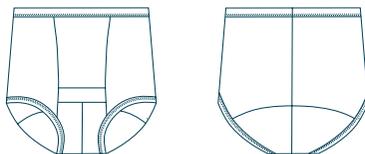


AMI SPX | Hohe Taille

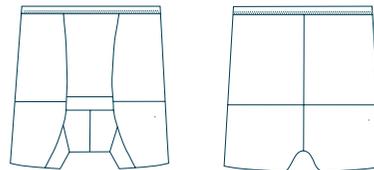


AMI SPX | Mit Bein

Anziehhilfe.

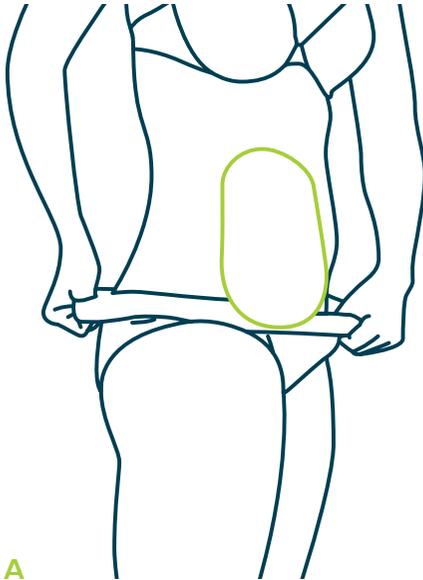


A

Für Unterwäsche ohne Loch
Schritt A, B + D befolgen.

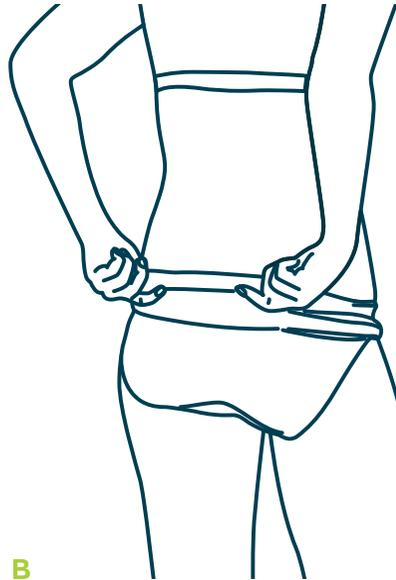

B


Vielleicht ist es für Sie bequemer
wenn Sie die Unterwäsche im Liegen
anziehen. Die Unterwäsche so weit
wie möglich hinten und vorne hoch-
ziehen. (A+B), so nahe wie möglich
zum Beutel hin.

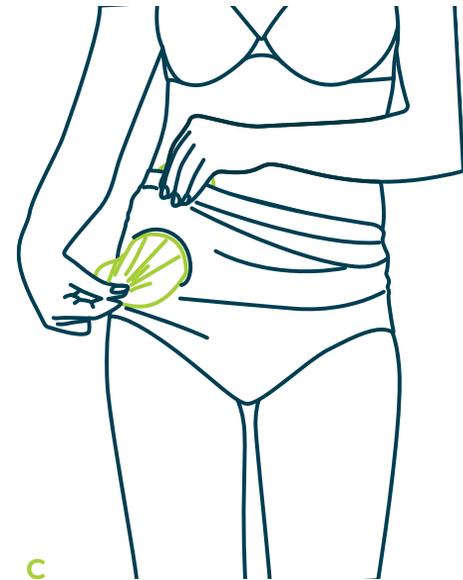

C

Den Beutel vom Ende her durch
die Öffnung ziehen (Abb. C).

Waschanleitung.

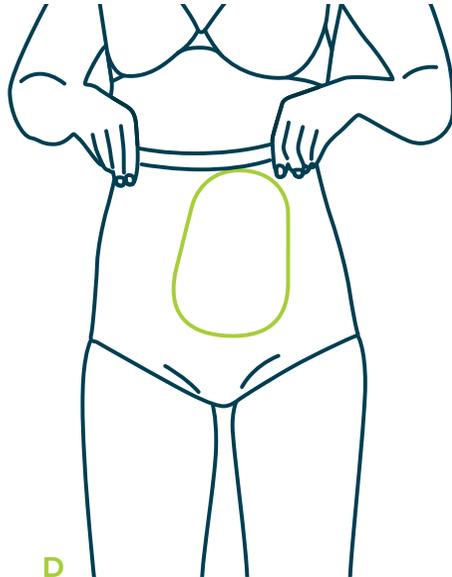

Die Unterwäsche so hoch wie möglich ziehen und den oberen Teil des Beutels vorsichtig durch die Öffnung ziehen (Abb. D).

Unterwäsche und Gürtel sind pflegeleicht.

- Es wird eine Wäsche von 40°C empfohlen.
- Sollte die Unterwäsche mit Ausscheidungen in Kontakt kommen, empfiehlt sich eine Wäsche mit 60°C (nur Unterwäsche).
- Die angegebene Waschtemperatur nicht überschreiten, es könnte die Qualität des Materials beeinflussen.
- Unterwäsche oder Gürtel am besten in einem separaten Beutel waschen.
- Bei Klettverschluss darauf achten, dass er geschlossen ist.
- Tumbler auf mittlere Temperatur einstellen.

Breites Sortiment.

Lust auf mehr?

In unserem Online-Shop finden Sie weitere Textilien speziell für Stoma-tragende.

Überzeugen Sie sich von unserem Sortiment unter publicare.ch/de/shop oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code.



Bestellschein.


Tube-, Easy Peel- und Shield Belt.

Anzahl	Produkt	Grösse	Umfang über Stoma	Individuelle Länge	Farbe	Gurt-höhe	Individuelle Höhe	Shield	Extras
_____	<input type="checkbox"/> Tube Belt (Schlupfform)	<input type="checkbox"/> Small	75 – 90 cm	_____ cm	<input type="checkbox"/> Beige	<input type="checkbox"/> 15 cm	_____ cm	<input type="checkbox"/> Links	<input type="checkbox"/> Öffnung anfertigen (bitte Position unten eintragen)
		<input type="checkbox"/> Medium	90 – 105 cm		<input type="checkbox"/> Weiss	<input type="checkbox"/> 20 cm		<input type="checkbox"/> Rechts	
	<input type="checkbox"/> Easy Peel Belt (mit Klettverschluss)	<input type="checkbox"/> Large	105 – 120 cm		<input type="checkbox"/> Schwarz	<input type="checkbox"/> 26 cm			<input type="checkbox"/> Tube Belt mit eingenähtem Stäbchen zur Verstärkung
		<input type="checkbox"/> X-Large	120 – 135 cm						
	<input type="checkbox"/> Shield Belt (mit Schild)	<input type="checkbox"/> XX-Large	135 – 148 cm						



Positionierung der Öffnung für den Stomabeutel

Bitte tragen Sie die gewünschte Öffnung in die Grafik ein.

Tube Belt

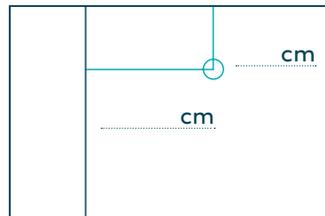

Easy Peel und Shield Belt

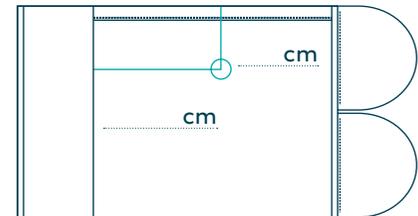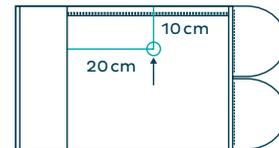

Bitte komplettieren Sie die Kontaktangaben auf der Rückseite.

Bestellschein.

Kontaktangaben.

Kunde | Kundin

Vorname

Name

Adresse

.....

Telefon

Art.-Nr. des Stomabeutels

Bemerkungen

.....

Stomatherapeutin | Spital | Arzt

Vorname

Name

Adresse

.....

Telefon

Talon ausfüllen, abtrennen und an Publicare AG, Vorderi Böde 9, 5452 Oberrohrdorf senden.

Bestellschein.


Breathable Tube- und Easy Peel Belt.

Anzahl	Produkt	Grösse*	Umfang über Stoma	Gurthöhe	Farbe	Öffnung
	<input type="checkbox"/> Tube Belt (Schlupf-form)	<input type="checkbox"/> X-Small	74 – 82 cm	<input type="checkbox"/> 15 cm: X-Small bis X-Large	<input type="checkbox"/> Beige	<input type="checkbox"/> Öffnung anfertigen (bitte Position unten eintragen)
		<input type="checkbox"/> Small	78 – 90 cm	<input type="checkbox"/> 20 cm: X-Small bis 3X-Large	<input type="checkbox"/> Weiss	
		<input type="checkbox"/> Medium	86 – 98 cm	<input type="checkbox"/> 26 cm: Medium bis 3X-Large	<input type="checkbox"/> Schwarz	
	<input type="checkbox"/> Easy Peel Belt (mit Klettverschluss)	<input type="checkbox"/> Large	94 – 106 cm			
		<input type="checkbox"/> X-Large	102 – 116 cm			
		<input type="checkbox"/> XX-Large	112 – 130 cm			
		<input type="checkbox"/> XXX-Large	126 – 148 cm			
				* Wünschen Sie mehr Unterstützung? Dann wählen Sie den Breathable Tube Belt eine Grösse kleiner.		



Positionierung der Öffnung für den Stomabeutel

Bitte tragen Sie die gewünschte Öffnung in die Grafik ein.

Breathable Tube Belt

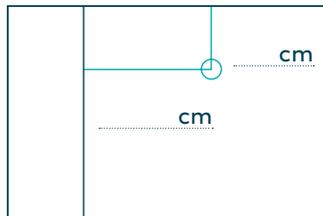

Breathable Easy Peel Belt

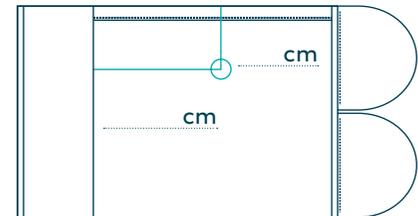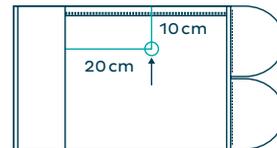

Bitte komplettieren Sie die Kontaktangaben auf der Rückseite.

Bestellschein.

Kontaktangaben.

Kunde | Kundin

Vorname

Name

Adresse

Telefon

Art.-Nr. des Stomabeutels

Bemerkungen

Stomatherapeutin | Spital | Arzt

Vorname

Name

Adresse

Telefon

Talon ausfüllen, abtrennen und an Publicare AG, Vorderi Böde 9, 5452 Oberrohrdorf senden.

Bestellschein.

Hernien-Unterwäsche.

Bestellangaben Breathable Briefs und Shorts

Anzahl	Grösse	Hüftumfang	Farbe	Bein	Öffnung
_____	<input type="checkbox"/> S/M	71 – 81 cm	<input type="checkbox"/> Beige	<input type="checkbox"/> Mit Bein	<input type="checkbox"/> Öffnung anfertigen
	<input type="checkbox"/> M/L	86 – 97 cm	<input type="checkbox"/> Weiss	<input type="checkbox"/> Ohne Bein	
	<input type="checkbox"/> L/XL	102 – 112 cm	<input type="checkbox"/> Schwarz		
	<input type="checkbox"/> XL/2XL	117 – 127 cm			
	<input type="checkbox"/> 2XL/3XL	132 – 142 cm			

Bestellangaben Hernien-Unterwäsche

Anzahl	Grösse	Taille Mann	Hüfte Frau	Farbe	Tailenhöhe	Bein	Nur für Frauen	Öffnung
_____	<input type="checkbox"/> S	76 – 89 cm	91 – 99 cm	<input type="checkbox"/> Beige	<input type="checkbox"/> Hohe Taille	<input type="checkbox"/> Mit Bein	<input type="checkbox"/> Spitzenüberzug	<input type="checkbox"/> Öffnung anfertigen
	<input type="checkbox"/> M	90 – 103 cm	100 – 108 cm	<input type="checkbox"/> Weiss	<input type="checkbox"/> Tiefe Taille	<input type="checkbox"/> Ohne Bein	<input type="checkbox"/> Klettverschluss	
	<input type="checkbox"/> L	104 – 117 cm	104 – 117 cm	<input type="checkbox"/> Schwarz			<input type="checkbox"/> Klettverschluss mit Druckknöpfen	
	<input type="checkbox"/> XL	118 – 131 cm	118 – 126 cm					
	<input type="checkbox"/> XXL	132 – 145 cm	127 – 135 cm					

Bitte komplettieren Sie die Kontaktangaben auf der Rückseite.

Bestellschein.

Kontaktangaben.

Kunde | Kundin

Vorname

Name

Adresse

Telefon

Bemerkungen

Stomatherapeutin | Spital | Arzt

Vorname

Name

Adresse

Telefon

Positionierung der Öffnung für den Stomabeutel

Wenn Sie eine Öffnung wünschen, helfen wir oder Ihre Stomaberaterin gerne.

Art.-Nr. des Stomabeutels

Talon ausfüllen, abtrennen und an Publicare AG, Vorderer Böde 9, 5452 Oberrohrdorf senden.

Wir kennen uns aus. Fragen Sie uns.

Publicare und Ihre Stomaberatung arbeiten eng zusammen. Es ist uns ein Anliegen, für Sie die ideale Lösung zu finden, so dass Sie Ihre HernienWäsche gerne tragen und Ihnen den nötigen Komfort schenkt.

Aus unserer langjährigen Erfahrung mit Stomatragenden können wir Ihnen weitere Informationen und empfehlenswerte Tipps geben. Rufen Sie uns an, wir sind für Sie da.

Übrigens, die gesamte Produktpalette zur Versorgung und Pflege Ihres Stomas ist bei Publicare erhältlich.

Haben Sie noch Fragen?

Unsere Mitarbeiterinnen im Kundendienst beraten Sie zu Produkten, deren Anwendung sowie der Abrechnung mit der Versicherung.



www.publicare.ch
Online bestellen
24h/7 Tage



+41 56 484 15 00
Mo – Fr
7 – 17 Uhr



+41 56 484 15 11
Mo – Fr
7 – 17 Uhr



info@publicare.ch
Mo – Fr
7 – 17 Uhr



Publicare AG
Vorderi Böde 9
5452 Oberrohrdorf